

SANTELEC

POIGNEES DE
LARYNGOSCOPES HEINE



Pièces détachées pour
Poignées de
Laryngoscopes *Heine*
disponibles chez
SANTELEC


9 impasse Lou Haou
B.P. 10 – Gazinet
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50
Fax : 05-56-36-00-10

@ : infos@santelec.com

POIGNEE STANDARD A PILES


Réf : F.01.22.860

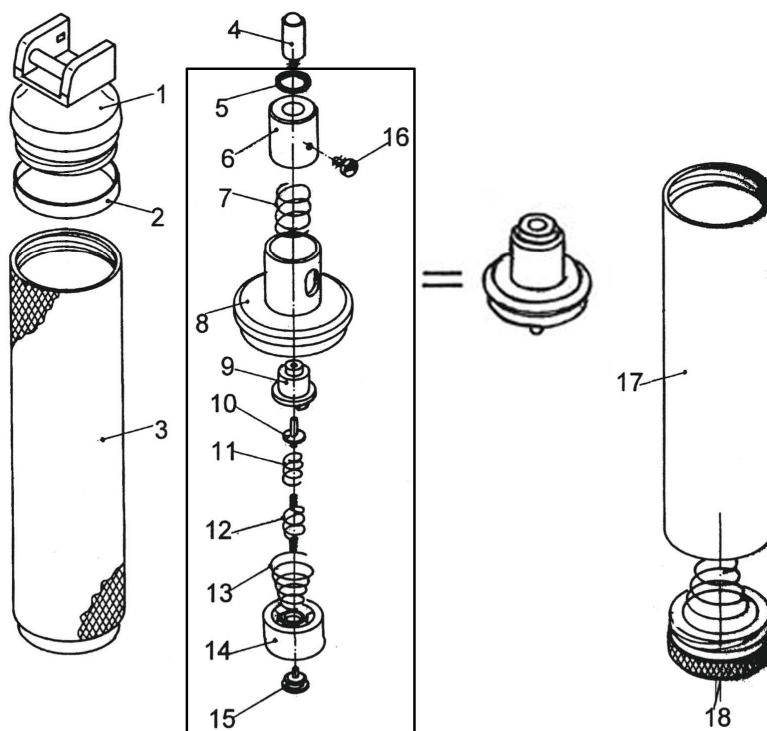

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1 à 3	Douille extérieure complète	Z.22.824
4	Ampoule 2,5V	888035
5 à 16 (ensemble)	Porte ampoule complet	Z.904.04.00
17	Douille intérieure	Z.921.17
18	Culot pour piles	Z.22.861
5 à 18	Boîtier complet	F.01.22.858

POIGNEE STANDARD A BATTERIE


Réf : F.02.22.863

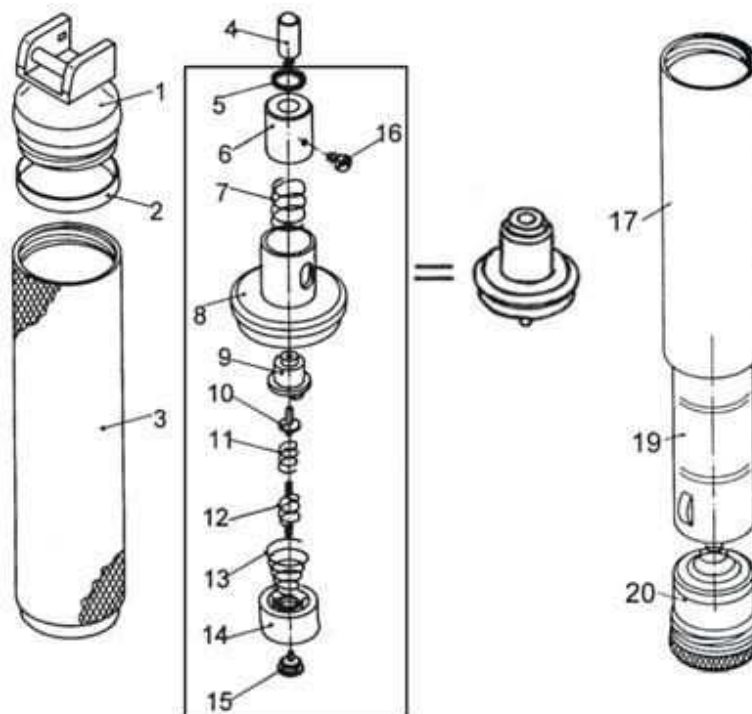

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1 à 3	Douille extérieure complète	Z.22.824
4	Ampoule 3,5V	888044
5 à 16 (ensemble)	Porte ampoule complet	Z.904.04.00
17	Douille intérieure	Z.921.17
19	Batterie 3,5V	X.02.99.382
20	Culot pour batterie	Z.22.867
5 à 20	Boîtier complet avec batterie	F.02.22.868

POIGNEE SANALON

Réf : F.01.22.815

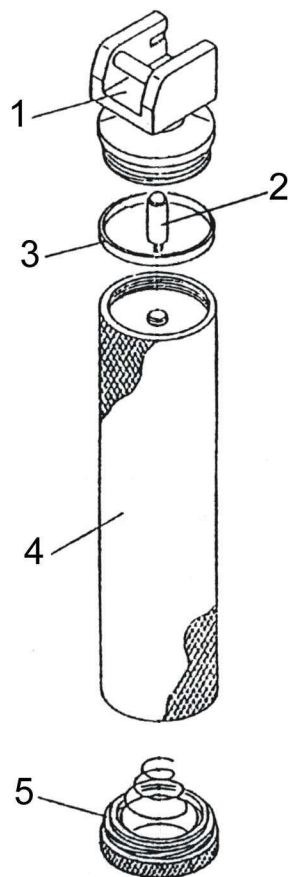


PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête de poignée	Z.395.01
2	Ampoule 2,5V	888035
3	Bague verte	Z.395.03
4	Corps	Z.395.04
5	Culot	Z.395.05

POIGNEE BETA

Réf : F.01.22.117 (à piles)


Réf : F.02.22.412 (à batterie)

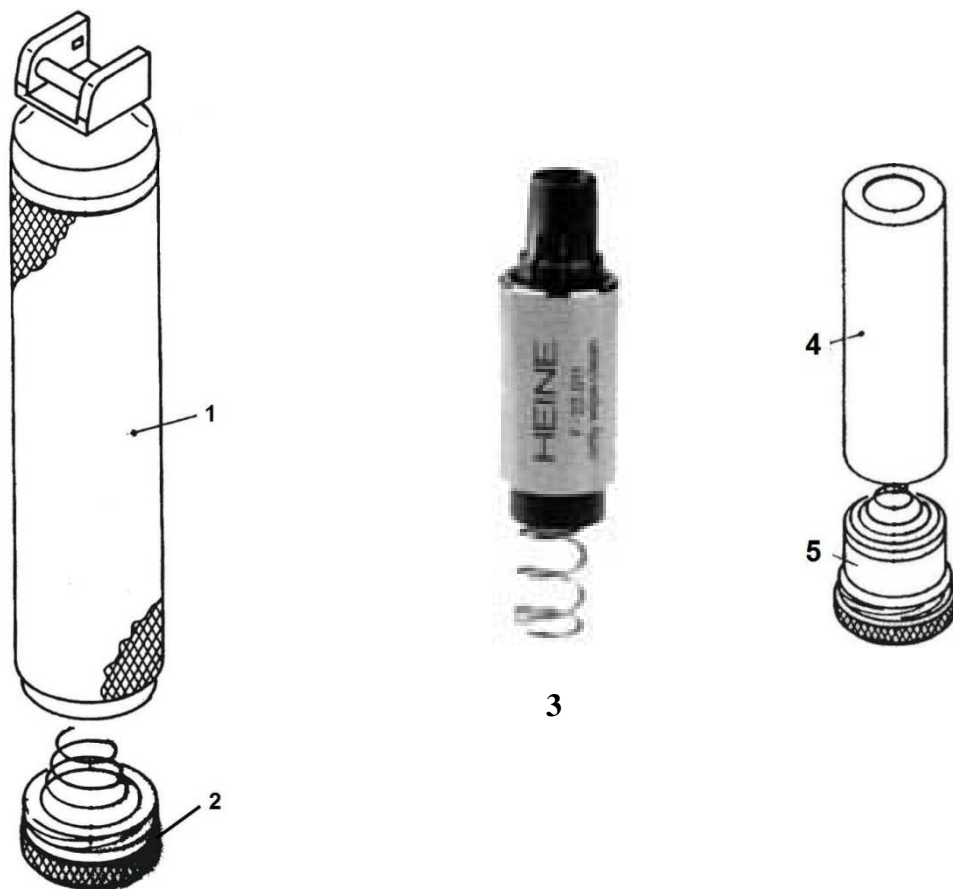

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Corps + Tête de poignée	Z.22.012
2	Culot pour piles	Z.99.119
3	Porte ampoule complet 2,5 V	Z.122.011
3	Porte ampoule complet 3,5 V	Z.222.011
4	Batterie 3,5 V	X.02.99.382
5	Culot pour batterie	Z.99.412


POIGNEE MANCHE COURT

Réf : F.01.22.812

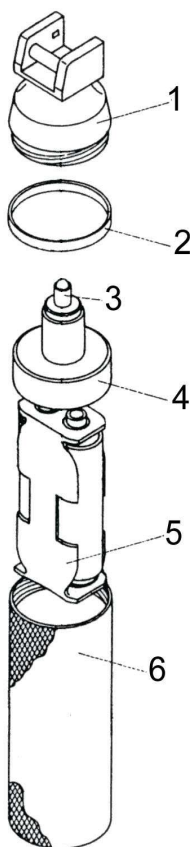

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête de poignée	Z.393.01
2	Bague verte	Z.393.02
3	Ampoule 2,5 V	888035
4	Porte ampoule	Z.393.04
5	Boîtier à piles	Z.393.05
6	Corps	Z.393.06

POIGNEE GRAND ANGLE
A PILES – Réf : F.01.22.941
A BATTERIE - Réf : F.02.22.942

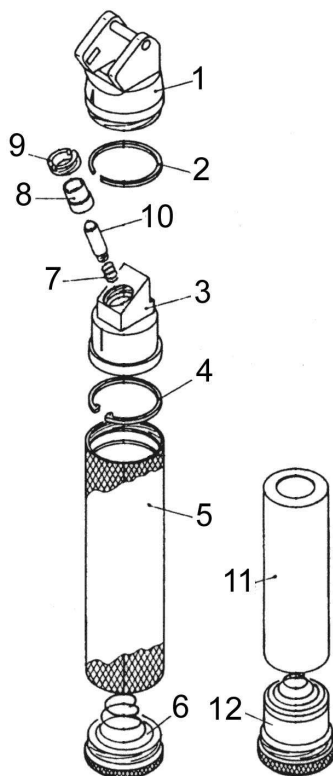


PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête de poignée	Z.931.01
2	Anneau clip	Z.931.02
3	Porte lampe	Z.931.03
4	Anneau de serrage	Z.931.04
5	Corps	Z.931.05
6	Culot pour piles	Z.99.119
7	Ressort	Z.931.09
8	Douille d'ampoule	Z.931.11
9	Bague filetée	Z.931.12
10	Ampoule 2,5V	888035
10	Ampoule 3,5V	888044
11	Batterie 3.5V	X.02.99.382
Z	Culot pour batterie	Z.99.412

PETITE POIGNEE

A PILES – Réf : F.01.22.800

A BATTERIE (2,5V)- Réf : F.01.22.806

A BATTERIE (3,5V)- Réf : F.02.22.806

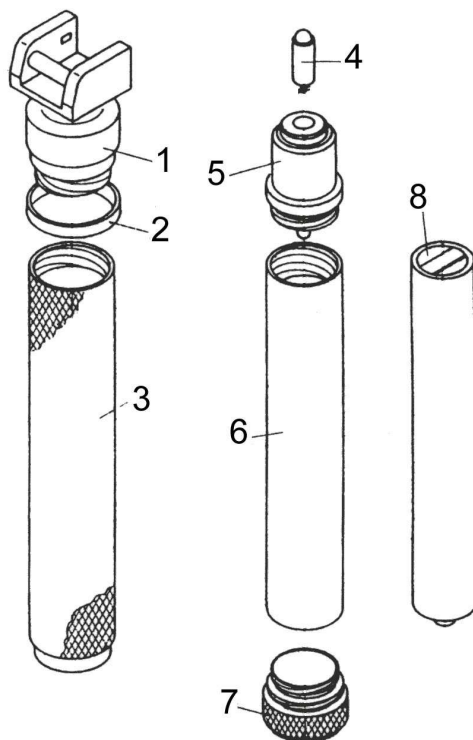

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1 à 3	Douille extérieure complète	Z.22.804
4	Ampoule 2,5V	888035
5	Porte ampoule complet	Z.901.04.00
6	Douille intérieure	Z.901.05
7	Culot	Z.901.07
5 à 7	Boîtier à piles complet	F.01.22.802
4	Ampoule 3,5V	888044
8	Batterie 2,5V	D.01.89.013
8	Batterie 3,5V	X.02.99.106