



CONSEILS D'ENTRETIEN



Comment nettoyer
vos brassards autoclavables
pour Garrots
marque : D&D

9 impasse Lou Haou
B.P. 60010 – Gazinet
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50
Fax : 05-56-36-00-10

@ : infos@santelec.com

NETTOYAGE DES BRASSARDS DE GARROTS AUTOCLAVABLES AVEC POCHE SILICONE D&D

Vérification préliminaire :

- Avant la 1^{ère} utilisation et pour toute opération de nettoyage, extraire la poche de son enveloppe.
- Avant chaque réemploi, s'assurer du bon état de chaque élément.

Pré-désinfection :

- *De l'enveloppe* : Immerger l'enveloppe dans les solutions désinfectantes appropriées (produits détergeants, décontaminants).
- *De la poche* : Utiliser à cet effet des lingettes imbibées de solutions décontaminantes (ne pas immerger la poche).

Nettoyage :

- *De l'enveloppe* :
 - 1- Laver l'enveloppe à la main, ou à la machine à 60°, en position de fermeture (pour éviter l'accrochage de différentes enveloppes entre elles).
 - 2- Rincer.
 - 3- **SECHER.**
- *De la poche* :
 - 1- Renouveler éventuellement l'opération de pré-désinfection (Ne pas immerger la poche).
 - 2- Rincer.
 - 3- **SECHER.**

Stérilisation :

- *De l'ensemble enveloppe et poche reconditionnées* : en autoclave à 134°C pendant 18 minutes.

AVERTISSEMENT

- Face à ces contraintes, un vieillissement accéléré de l'enveloppe est inévitable.
- Il convient donc d'envisager un renouvellement plus fréquent de celle-ci.
- Ne pas clamber les tubes à l'aide de pinces métalliques (risque de coupures).



Avant toute mise sous pression, vérifier que le tube de raccordement est parfaitement connecté au garrot.