



CONSEILS D'ENTRETIEN



Comment nettoyer vos brassards immergeables

9 impasse Lou Haou
B.P. 60010 – Gazinet
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50
Fax : 05-56-36-00-10
@ : infos@santelec.com

NETTOYAGE DES BRASSARDS D&D

Nettoyage et décontamination à sec :

- Vaporiser une mousse détergente, désinfectante, bactéricide, sur le brassard en prenant soin de bien répartir le produit (produit recommandé : SURFASAFE des laboratoires ANIOS).
- Laisser agir 15 minutes.
- Le rinçage est inutile, essuyer à l'aide d'une lingette à usage unique.

Nettoyage et décontamination par immersion :

- Nettoyer le brassard à l'eau.
- Obturer le ou les tubes au moyen du système de fermeture prévu : Valve automatique, Bouchon, Clamp.
- Immerger l'ensemble tubes et brassard dans une solution désinfectante appropriée (produit recommandé : ANIOSYME DD1 - dilution à 0,5% - des laboratoires ANIOS).
- Temps d'immersion optimal : 15 minutes.
- Rincer soigneusement à l'eau, renouvellement du bain de trempage après chaque usage (Circulaire DGS N°138 du 03/2001).