



CONSEILS D'ENTRETIEN




Comment entretenir vos
poignées de
Laryngoscopes F.O. *Heine*

9 impasse Lou Haou
B.P. 60010 – Gazinet
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50
Fax : 05-56-36-00-10
@ : infos@santelec.com

ENTRETIEN DES POIGNEES DE LARYNGOSCOPES F.O HEINE

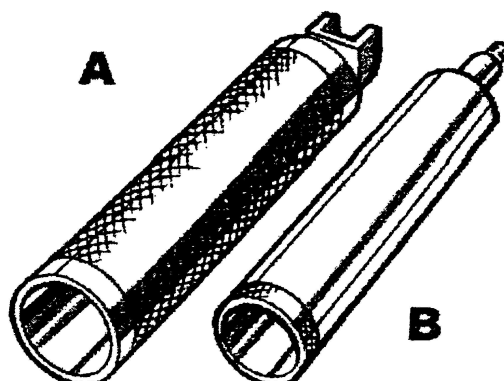

Les poignées de laryngoscope F.O modèle "Standard" et "petit" s'entretiennent de la manière suivante

(A) DOUILLE EXTERIEURE :

- Sortir le boîtier intérieur en dévissant le culot inférieur.
- La douille extérieure peut alors être nettoyée à **l'eau chaude**, ou avec une **brosse douce** ou une **lingette** imbibée d'un produit nettoyant
- La douille extérieure peut être stérilisée à l'autoclave, à l'oxyde d'éthylène, au Sterrad en respectant les recommandations du fabricant

(B) BOITIER INTERIEUR:

- Il est à noter que le boîtier intérieur n'est **pas étanche**
- Pour cette raison, il ne doit **JAMAIS ETRE IMMERGE** dans un liquide quel qu'il soit
- Le boîtier intérieur peut être nettoyé à l'aide d'une **lingette** imbibée d'alcool ou d'un produit nettoyant adapté.
- Bien surveiller qu'aucun liquide ne pénètre dans le logement de la lampe, ce qui peut entraîner des problèmes d'oxydation et donc de contact.

Après nettoyage et séchage, revisser le boîtier dans la douille extérieure.

UTILISATION ET NETTOYAGE DES POIGNEES DE LARYNGOSCOPES « SANALON » HEINE

Référence : F.01.22.815

Cette poignée se compose d'une douille, d'un culot dévissable pour changer les piles de la tête d'accrochage en Sanalon.

UTILISATION DE LA POIGNEE :

Changement de piles : Les piles usées sont à retirer après avoir dévissé le bouchon inférieur. Il est recommandé d'utiliser exclusivement des piles alcalines type IER LR 14.


Changement d'ampoule : Dévissez la tête de la poignée et enlevez l'ampoule. Mettez à la place une nouvelle ampoule (*Référence : X.01.88.035*) et vissez la tête sur la douille de la poignée.

NETTOYAGE ET DECONTAMINATION :

Nettoyez la poignée avec un chiffon ou une lingette imbibés de solution désinfectante, adaptée à la décontamination du matériel médical.

⚠ NE JAMAIS IMMERGER LA POIGNEE ⚠

Stérilisation gazeuse possible après avoir retiré les piles.

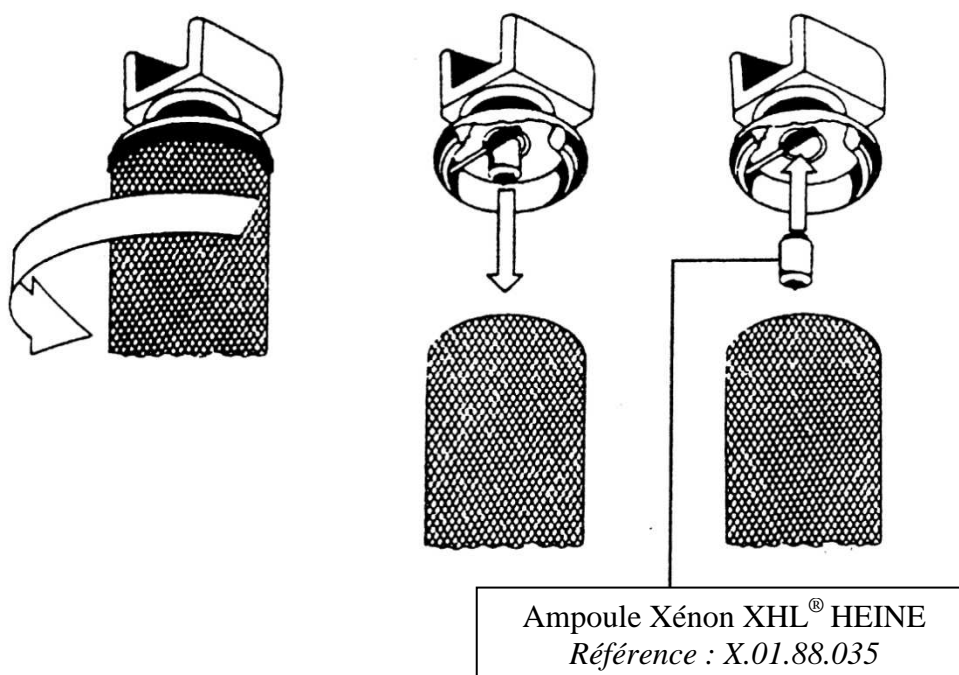

Conforme à la norme ISO 7376-3 : 1996