

# SANTELEC

POIGNEES DE  
LARYNGOSCOPES HEINE



Pièces détachées pour  
Poignées de  
Laryngoscopes *Heine*  
disponibles chez  
SANTELEC


9 impasse Lou Haou  
B.P. 60010 – Gazinet  
33611 CESTAS Cedex

Tel : 05-57-26-40-50  
Fax : 05-56-36-00-10

@ : [infos@santelec.com](mailto:infos@santelec.com)

## POIGNEE STANDARD A PILES


Réf : F.01.22.860

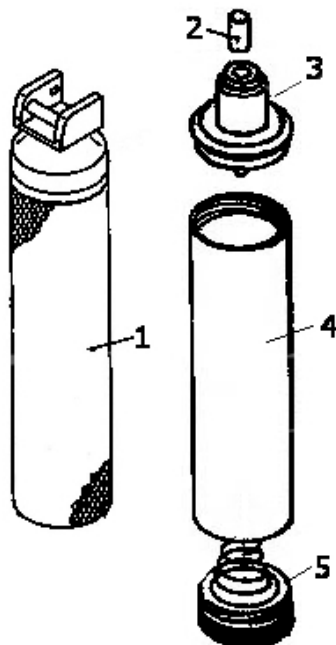

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Douille extérieure complète	Z.22.824
2	Ampoule 2,5V	888035
3	Porte ampoule complet	Z.904.04.00
4	Douille intérieure	Z.921.17
5	Culot pour piles	Z.22.861
2 à 5	Boîtier complet	F.01.22.858

## POIGNEE STANDARD A BATTERIE


Réf : F.02.22.863

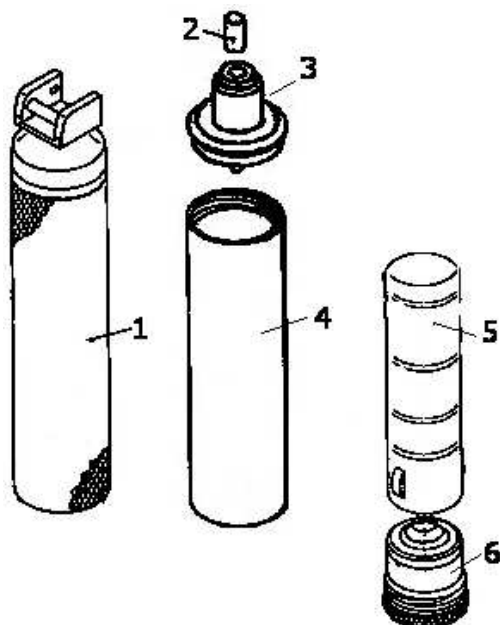

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Douille extérieure complète	Z.22.824
2	Ampoule 3,5V	888044
3	Porte ampoule complet	Z.904.04.00
4	Douille intérieure	Z.921.17
5	Batterie 3,5V	X.02.99.382
6	Culot pour batterie	Z.22.867
2 à 6	Boîtier complet avec batterie	F.02.22.868

## POIGNEE SANALON


Réf : F.01.22.815

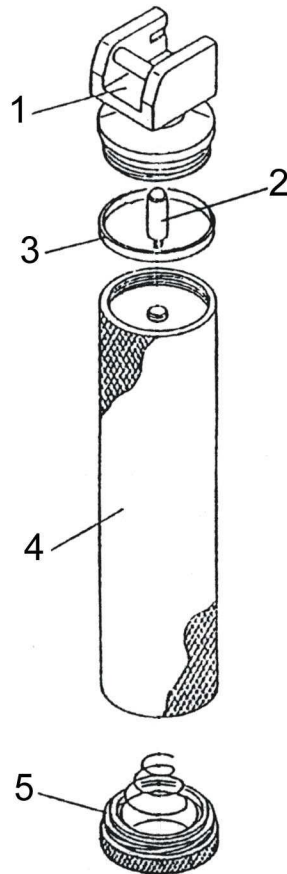

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête de poignée	Z.395.01
2	Ampoule 2,5V	888035
3	Bague verte	Z.395.03
4	Corps	Z.395.04
5	Culot	Z.395.05

## POIGNEE BETA


Réf : F.01.22.117 (à piles)

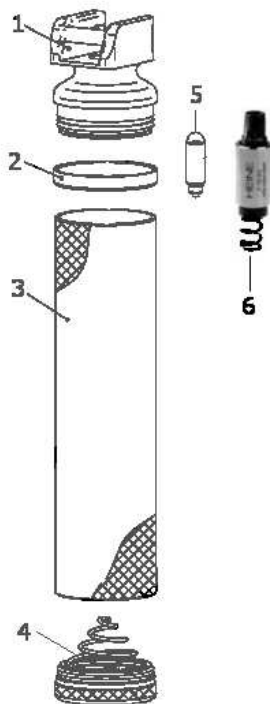

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête de poignée	Z.949.01
2	Bague verte	Z.949.02
3	Corps	Z.949.03
4	Culot	Z.99.119
5	Ampoule 2,5V	888035
6	Porte ampoule complet (avec 888035)	Z.122.011


## POIGNEE COURTE

Réf : F.01.22.812

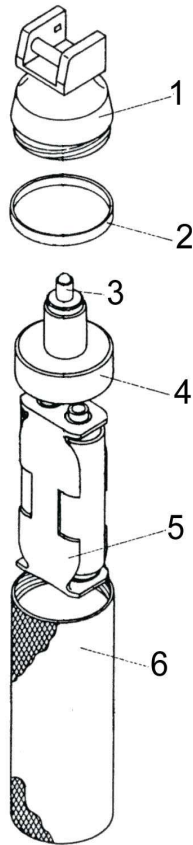

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête de poignée	Z.393.01
2	Bague verte	Z.393.02
3	Ampoule 2,5 V	888035
4	Porte ampoule	Z.393.04
5	Boîtier à piles	Z.393.05
6	Corps	Z.393.06

**POIGNEE GRAND ANGLE**  
**A PILES – Réf : F.01.22.941**  
**A BATTERIE - Réf : F.02.22.942**

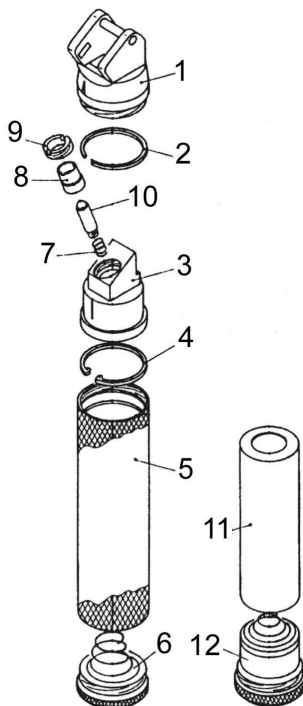


PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Tête de poignée	Z.931.01
2	Anneau clip	Z.931.02
3	Porte lampe	Z.931.03
4	Anneau de serrage	Z.931.04
5	Corps	Z.931.05
6	Culot pour piles	Z.99.119
7	Ressort	Z.931.09
8	Douille d'ampoule	Z.931.11
9	Bague fileté	Z.931.12
10	Ampoule 2,5V	888035
10	Ampoule 3,5V	888044
11	Batterie 3.5V	X.02.99.382
Z	Culot pour batterie	Z.99.412

## PETITE POIGNEE

**A PILES – Réf : F.01.22.800**

**A BATTERIE (2,5V)- Réf : F.01.22.806**

**A BATTERIE (3,5V)- Réf : F.02.22.806**

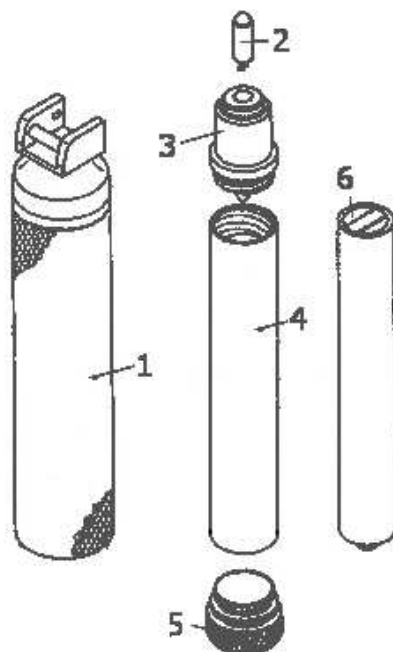

PIECE N°	DESIGNATION	REFERENCE
1	Douille extérieure complète	Z.22.804
2	Ampoule 2,5V	888035
3	Porte ampoule complet	Z.901.04.00
4	Douille intérieure	Z.901.05
5	Culot	Z.901.07
2 à 5	Boîtier complet	F.01.22.802
2	Ampoule 3,5V	888044
6	Batterie 2,5V	D.01.89.013
6	Batterie 3,5V	X.02.99.106